

NDDP

NEEDLING DERMA PEEL

**Protocolli per risolvere
VELOCEMENTE
i piu' comuni inestetismi
in medicina estetica**



WP Group
estetica & benessere
www.worldpharma.it

Cosa è il NEEDLING DERMA PEEL (NDP)

IL NEEDLING DERMA PEEL, è un protocollo rivoluzionario per trattare con grande successo le più frequenti problematiche in Medicina Estetica e/o Chirurgia Estetica:

- 1- Cicatrici post acne-Cheloidi
- 2- Iperpigmentazioni (Melasma, Cloasma)
- 3- Macchie senili
- 4- Grave fotoaging
- 5- Smagliature
- 6- Pelle atonica (rassodamento)



L'inetestismo cutaneo viene affrontato a 360°. Viene effettuato un trattamento **NEEDLING verticale** con **Digital Pop Pen** (in alternativa può andare bene anche un Needling obliquo con Roller a 600 aghi), ad una profondità variabile (Viso-collo 0,5-1,5 mm, Corpo 1,5-2,0 mm), che può essere totale, oppure riservato alle zone dell'inetestismo da trattare (es: in caso di **melasma, cloasma, macchie senili, cicatrici, cheloidi**, il Needling viene effettuato **soltanto dove sono presenti gli inetestismi**).

Il trattamento **NDP (Needling Derma Peel)** consiste di pochi semplici passaggi:

- 1 Cleanser:** detergere l'area con la **Skin Tech Cleanser Foam**.
- 2 Needling con sostanze attive:** la testina del dispositivo per needling verticale automatico **Digital Pop** ha un serbatoio che permette di immettere sostanze da veicolare sottopelle.
- 3 Peeling al TCA 15% e fenolo 5%:** Subito dopo, nelle zone dove è stato applicato il Needling, viene effettuato un soft peeling al TCA (**Easy TCA Pain Control**), che verrà disteso su tutta la zona, a prescindere dall'inetestismo.
- 4 Post Peel:** Il trattamento va completato con un massaggio a base di Bava di lumaca e acido ialuronico (prodotto **Halice**), e subito dopo, con l'applicazione della Post Peel Mask, in dotazione del kit Easy TCA Pain Control.

A domicilio, è obbligatorio un protettivo solare 50+/30+ (**Melablock 30+ / Melablock 50+**) da applicare ogni 3 ore, ed una crema specifica per il trattamento effettuato (**Blending Bleaching Cream** per le ipercromie, **Strimatrix** per le smagliature, **Vit.E cream** per il grave fotoaging, **Actilift** cream per il rassodamento, **Halice** gel per le cicatrici post acne, i cheloidi e le macchie cutanee).

Il **NDP** va ripetuto ogni 30 giorni per 2 volte. Nell'intervallo, tra un NDP e l'altro, applicare solo il trattamento **Easy TCA Pain Control** completo.

Quindi i trattamenti saranno:

- giorno 1: **NDP**
- giorno 15: **Easy TCA Pain Control**
- giorno 30: **NDP**
- giorno 45: **Easy TCA Pain Control**

Durata totale del trattamento: solo 4 sedute

Solamente se necessario:

- giorno 60: **NDP**
- giorno 75: **Easy TCA Pain Control**

Protocolli NDP

1 - Cicatrici post acne-Cheloidi



- A) Preparare la soluzione di **Easy TCA Pain Control**, miscelando nell'apposito contenitore 0,7 ml di **TCA Activator** con 2 ml di **Basic solution**.
- B) Preparare la **Post Peel mask**, distendendo a strisce da 0,5 g, sull'apposita carta dosatrice.
- C) Detergere la cute con **Cleanser foam Skin Tech**.
- D) Prelevare con una siringa, 2 ml del prodotto **Halice**, flaconi da 5 ml, e applicarlo con il Needling a 1-1,5 mm di profondità, facendo cadere delle gocce sotto alla testina a 11 aghi, avendo cura di distenderle manovrando la testina della **Digital Pop Pen**, in senso circolatorio.
- E) Distendere la soluzione di **Easy TCA** con 2 cotton fioc, prima sulle zone trattate con il Needling, e successivamente su tutta la zona (ad esempio tutto il viso).
- F) Applicare la **Post Peel Mask**, in dotazione con il Kit **EASY TCA Pain Control**.
- G) trattamento domiciliare: **Melablock 50+** da applicare ogni tre ore e **Vit. E cream**.



2 - Iperpigmentazioni (Melasma, Cloasma)



- A) Preparare la soluzione di **Easy TCA Pain Control**, miscelando nell'apposito contenitore 0,7 ml di **TCA Activator** con 2 ml di **Basic solution**.
- B) Preparare la **Post Peel mask**, distendendo a strisce da 0,5 g, sull'apposita carta dosatrice.
- C) Detergere la cute con **Skin Tech Cleanser**.
- D) Prelevare con una siringa, 2 ml del prodotto **RRS Whitening** fiale sterili iniettabili, flaconi da 3 ml, e applicarlo con il Needling a 0,5-1 mm di profondità, facendo cadere delle gocce sotto alla testina a 11 aghi. Distenderle manovrando la testina della **Digital Pop Pen**, in senso circolatorio.
- E) Applicare la soluzione di **Easy TCA** con 2 cotton fioc, prima sulle zone trattate con il Needling, e successivamente su tutta la zona (ad esempio tutto il viso).
- F) Applicare la **Post Peel Mask**, in dotazione con il Kit **EASY TCA Pain Control**.
- G) trattamento domiciliare: **Melablock 50+** da applicare ogni tre ore e **Bleanding Bleaching Cream** da applicare due volte al giorno solo sulla macchia.



3 - Macchie senili



- A) Preparare la soluzione di **Easy TCA Pain Control**, miscelando nell'apposito contenitore 0,7 ml di **TCA Activator** con 2 ml di **Basic solution**.
- B) Preparare la **Post Peel mask**, distendendo a strisce da 0,5 g , sull'apposita carta dosatrice.
- C) Detergere la cute con **Cleanser foam Skin Tech**.
- D) Prelevare con una siringa , 2 ml del prodotto **RRS Whitening** fiale sterili iniettabili, flaconi da 3 ml, e applicarlo con il Needling a 1-1,5 mm di profondità, facendo cadere delle gocce sotto alla testina a 11 aghi. Appoggiare la testina della **Digital Pop Pen**, incorrispondenza delle macchie senili, e iniziare la microperforazione, rimando posizionati sulle macchie pe due tre secondi.
- E) Applicare la soluzione di **Easy TCA** con 2 cotton fioc, prima sulle zone trattate con il Needling, e successivamente su tutta la zona (ad esempio tutto il viso).
- F) Applicare la **Post Peel Mask**, in dotazione con il Kit **EASY TCA Pain Control**.
- G) Trattamento domiciliare: **Melablock 50+** da applicare ogni tre ore e **Bleanding Bleaching Cream** da applicare due volte al giorno solo sulla macchia.



4 - Grave fotoaging



- A) Preparare la soluzione di **Easy TCA Pain Control**, miscelando nell'apposito contenitore 0,7 ml di **TCA Activator** con 2 ml di **Basic solution**.
- B) Preparare la **Post Peel mask**, distendendo a strisce da 0,5 g , sull'apposita carta dosatrice.
- C) Detergere la cute con **Cleanser foam Skin Tech**.
- D) Prelevare con una siringa , 2 ml del prodotto **Hyalift 75 proactive**, flaconi da 5 ml, e applicarlo con il Needling a 1-1,5 mm di profondità, facendo cadere delle gocce sotto alla testina a 11 aghi, avendo cura di distenderle manovrando la testina della **Digital Pop Pen**, in senso circolatorio.
- E) Distendere la soluzione di **Easy TCA** con 2 cotton fioc, prima sulle zone trattate con il Needling, e successivamente su tutta la zona (ad esempio tutto il viso).
- F) applicare con lieve massaggio, il prodotto **HALICE** a base di Bava di lumaca 98% & acido ialuronico.
- G) Applicare la **Post Peel Mask**, in dotazione con il Kit **EASY TCA Pain Control**.
- H) Trattamento domiciliare: **Melablock 50+** da applicare ogni 3 ore, **Vit. E cream** 2 volte al giorno, **Atrofillin cream** la sera, **Halice Cream** il mattino

5 - Smagliature



- A) Preparare la soluzione di **Easy TCA Pain Control**, miscelando nell'apposito contenitore 0,7 ml di **TCA Activator** con 2 ml di **Basic solution**.
- B) Preparare la **Post Peel mask**, distendendo a strisce da 0,5 g, sull'apposita carta dosatrice.
- C) Detergere la cute con **Cleanser foam Skin Tech**.
- D) Prelevare con una siringa, 2 o più ml del prodotto **STRIMATRIX** fiale sterili iniettabili, flaconi da 10 ml, e applicarlo con il **Needling** a 2 mm di profondità, facendo cadere delle gocce sotto alla testina a 11 aghi. Appoggiare la testina della **Digital Pop Pen**, in corrispondenza delle smagliature, e iniziare la microperforazione, spostandosi con movimenti circolari lungo la smagliatura, insistendo sui bordi.
- E) Applicare la soluzione di **Easy TCA** con 2 cotton fioc, prima sulle zone trattate con il **Needling**, e successivamente su tutta la zona.
- F) Applicare la **Post Peel Mask**, in dotazione con il Kit **EASY TCA Pain Control**.
- G) trattamento domiciliare: **Strimatrix cream** da applicare mattina e sera.



6 - Pelle atonica-rassodamento



- A) Preparare la soluzione di **Easy TCA Pain Control**, miscelando 0,7 ml di **TCA Activator** con 2 ml di **Basic solution**.
- B) Preparare la **Post Peel mask**, distendendo a strisce da 0,5 g, sull'apposita carta dosatrice.
- C) Detergere la cute con **Cleanser foam Skin Tech**.
- D) Miscelare il prodotto **Silisorg Tensor** fiale sterilida 5 ml, inserendo tutta la soluzione dentro il flacone punzonabile del prodotto **Tensor Lift** (flacone da 10 ml con 5 ml di soluzione).
- E) Prelevare con una siringa, 2 ml della soluzione ottenuta, inserirlo nel serbatoio della testina e applicarlo con il **Needling** a 1-1,5 mm di profondità, avendo cura di distenderle manovrando in senso circolatorio la **Digital Pop Pen**.
- F) Distendere la soluzione di **Easy TCA Pain Control** con 2 cotton fioc, prima sulle zone trattate con il **Needling**, e successivamente su tutta la zona.
- G) Applicare con lieve massaggio, il prodotto **Halice** a base di Bava di lumaca 98% & a ialuronico.
- H) Applicare la **Post Peel Mask**, in dotazione con il Kit **EASY TCA Pain Control**.
- I) Trattamento domiciliare: **Melablock 50+** da applicare ogni tre ore e **Actilift Cream** da applicare due-tre volte al giorno. In caso di trattamento rassodante al seno applicare **Actilift Cream** la mattina e **Mamofilin Cream** la sera.




Per gentile concessione della Dott.ssa Simona Vari

DISPOSITIVI PER IL NEEDLING

Digital Pop

Digital Hand wireless

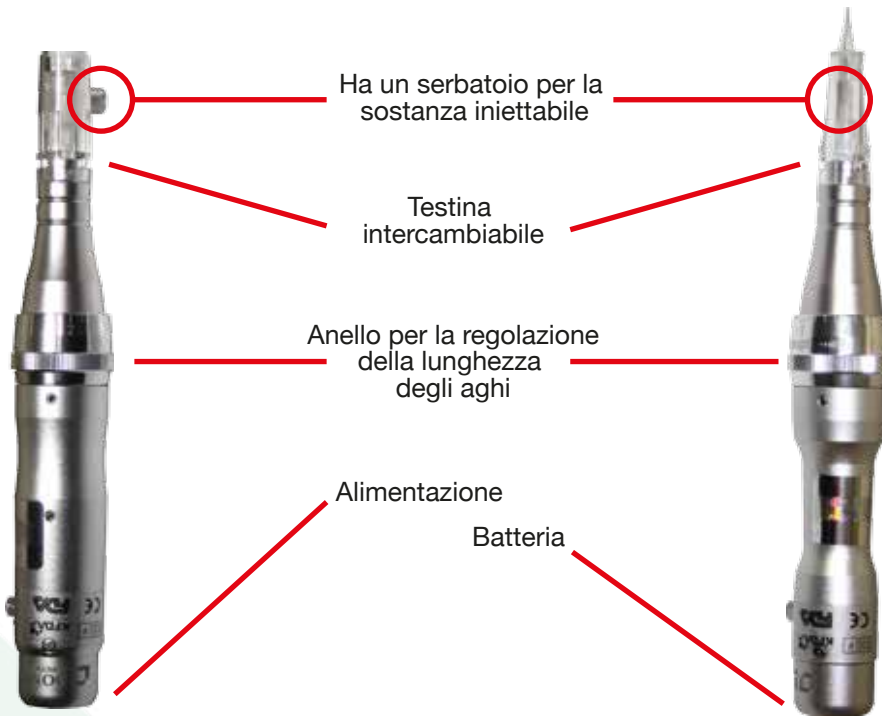

Caratteristiche:

- 10 velocità di controllo (Digital Pop)
- 4 velocità di controllo (Digital Hand)
- Lunghezza degli aghi regolabile
- Ago da agopuntura
- Sistema di sicurezza contro le infezioni
- Controllo a pedale (Digital Pop)
- Senza fili (Digital Hand)

Vantaggi:

- Controllabile con una sola mano
- Azionamento a pedale (Digital Pop)
- Silenziosa
- Dolore ridotto per il paziente
- Design ergonomico
- Senza rischio di infezioni
- Aghi sicuri
- Dispositivo multiuso:
 - Terapia con Micro aghi (MTS)
 - Tatuaggi o makeup permanente




Testine

SICUREZZA DALLE INFEZIONI

Testine di aghi regolabili sicure per tutti i modelli prodotti

Testina per microperforazione a 11 aghi

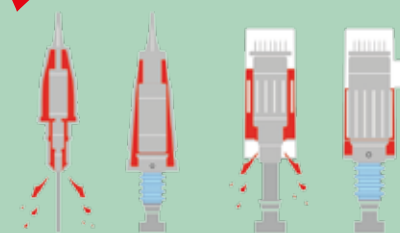

CONCORRENZA BOMTECH CONCORRENZA BOMTECH

La cartucce di aghi della Bomtech per tutti i suoi prodotti hanno proprietà impermeabili (Membrane Type, Worldwide Patent) per prevenire schizzi di sangue o infezioni durante il trattamento.



Testina per makeup permanente

Listino prezzi dei prodotti menzionati nel trattamento

Prodotti professionali

- <i>Digital Pop</i> - dispositivo needling	€ 1.260,00
- <i>Digital Hand</i> - dispositivo needling senza fili	€ 1.400,00
- <i>Testine per Digital Pop Pen</i> confz da 25 testine	€ 275,00
- <i>Easy TCA Pain Control kit</i> da 4 trattamenti	€ 128,00
- <i>Easy TCA Pain Control kit</i> da 24 trattamenti	€ 490,00
- <i>Halice</i> - Soluzione a base di bava di lumaca 98% & A.ialuronico scatola da 6 flaconi da 5 ml	€ 160,00
- <i>Silisorg Tensor</i> - scatola da 12 fiale da 5 ml	€ 138,00
- <i>Tensor Lift</i> - scatola da 6 fiale da 5 ml con DMAE	€ 238,00
- <i>Hyalift 75 Pro Active</i> - scatola da 6 fiale da 5 ml	€ 238,00
- <i>Strimatrix</i> - scatola da 6 fiale da 10 ml- Antismagliature	€ 148,00
- <i>Whitening</i> - scatola da 6 fiale da 3 ml- sbiancante	€ 148,00

Prodotti domiciliari

- <i>Blending Bleaching cream</i> - flacone da 50 g	€ 40,00
- <i>Vitamina E Cream</i> - tubo da 50 g	€ 40,00
- <i>Atrofillin cream</i> - tubo da 50 gr	€ 80,00
- <i>Melablock 50+</i> - tubo da 50 g	€ 28,00
- <i>Actilift Cream</i> - tubo da 50 g	€ 52,00
- <i>Mamofillin Cream</i> - tubo da 50 g	€ 73,00
- <i>Strimatrix Cream</i> - tubo da 200 g	€ 54,00
- <i>Halice Gel</i> - tubo da 50 g	€ 99,00
- <i>Halice Gel</i> - tubo da 100 g	€ 175,00



WP Group

estetica & benessere

www.worldpharma.it

WP Group srl
Via Luigi Pirandello 27 - 00137 Roma (RM)
Tel: (+39) 0686295985 - Fax: (+39) 0682580399
Tel: (+39) 0682001784 - Cell: (+39) 335 1093580
servizioclienti@wpgroup.it